

正しいエコ採便管での便の取り方

必ずお読み下さい

- ・容器の中の液は捨てないで下さい。
- ・採便の量が多すぎても少なすぎても正しい検査が出来ません。
- ・人体に直接使用しないで下さい。
- ・採便以外の目的で使用しないで下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

1 袋に必要事項を記入します。




2. 便のしかた。(便器にトイレットペーパーを敷き、その上に排便してください。)



3. 採便管のキャップをゆっくり引き抜きます。



4. 採便管のキャップについてる棒の先端部分を便に差し込み回転させ抜き取る。この作業を2回程繰り返して下さい。

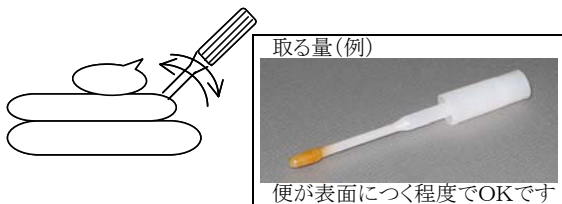

5. キャップを本体にしっかり差し込む。



6. 袋に入れできるだけ冷所に保存して下さい。

正しいエコ採便管での便の取り方

必ずお読み下さい

- ・容器の中の液は捨てないで下さい。
- ・採便の量が多すぎても少なすぎても正しい検査が出来ません。
- ・人体に直接使用しないで下さい。
- ・採便以外の目的で使用しないで下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

1. 袋に必要事項を記入します。




2. 便のしかた。(便器にトイレットペーパーを敷き、その上に排便してください。)



3. 採便管のキャップをゆっくり引き抜きます。



4. 採便管のキャップについてる棒の先端部分を便に差し込み回転させ抜き取る。この作業を2回程繰り返して下さい。

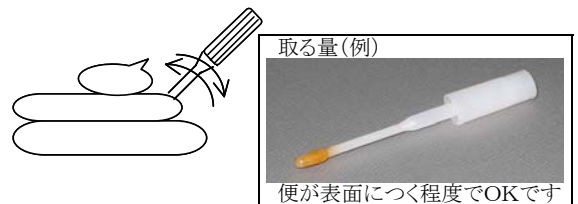

5. キャップを本体にしっかり差し込む。



6. 袋に入れできるだけ冷所に保存して下さい。