

## 正しいCMナイン-5採便管での便の取り方

### 必ずお読み下さい

- ・採便管のキャップについている棒を直接肛門に挿入し、便を採取しないでください。
- ・容器の中の液は捨てないで下さい。
- ・採便以外の目的で使用しないで下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

1 袋に必要事項を記入します。




2. 便のしかた。(便器にトイレットペーパーを敷き、その上に排便してください。)




3. 採便管のキャップをゆっくり引き抜きます。



4. 採便管のキャップについてる棒の先端部分を便に差し込み回転させ抜き取る。この作業を2回程繰り返して下さい。

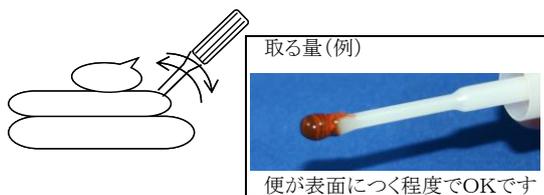

5. キャップを本体にしっかり差し込む。

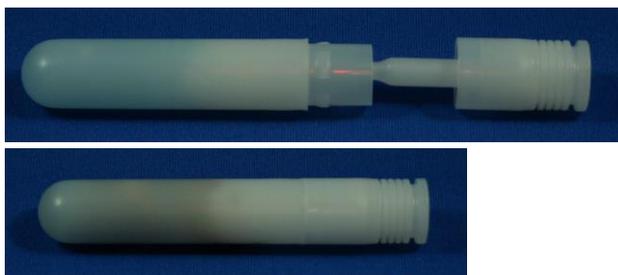

6. 袋に入れてできるだけ冷所に保存して下さい。

## 正しいCMナイン-5採便管での便の取り方

### 必ずお読み下さい

- ・採便管のキャップについている棒を直接肛門に挿入し、便を採取しないでください。
- ・容器の中の液は捨てないで下さい。
- ・採便以外の目的で使用しないで下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。

1. 袋に必要事項を記入します。




2. 便のしかた。(便器にトイレットペーパーを敷き、その上に排便してください。)




3. 採便管のキャップをゆっくり引き抜きます。



4. 採便管のキャップについてる棒の先端部分を便に差し込み回転させ抜き取る。この作業を2回程繰り返して下さい。

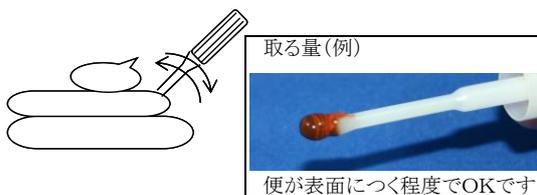

5. キャップを本体にしっかり差し込む。

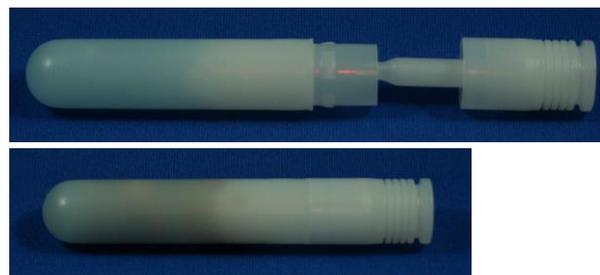

6. 袋に入れてできるだけ冷所に保存して下さい。