


C型採便管取扱説明書

1. キャップの開け方

キャップを左方向(逆時計回り)に回転させ キャップを開けてキャップ採便スプーンを引き抜きます。

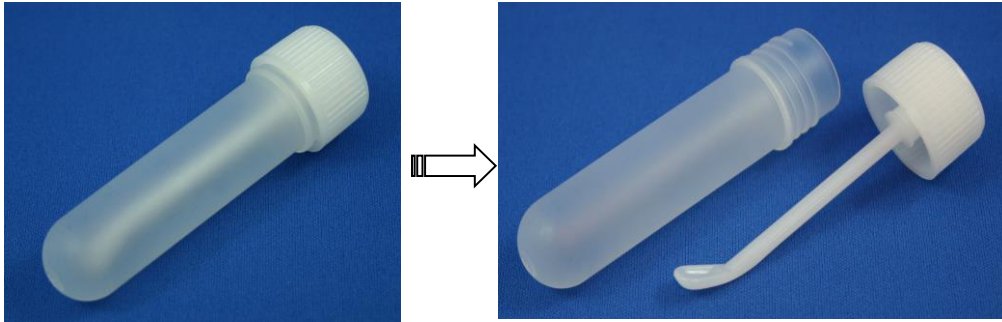

2. 便のとり方


キャップ採便スプーン(先端)であずき大の便を採取してください。
(スプーン先端にのる少量の便)



注意: 直接肛門に入れての採取はできません。

3. キャップ本体の装着

採便管本体に、便を採取したままキャップ採便スプーンを挿入してください。

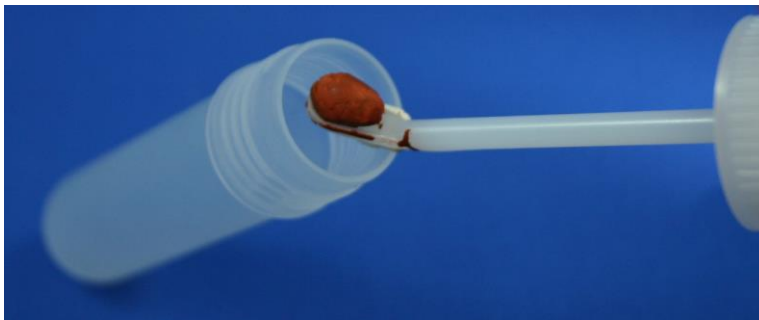

4. キャップの閉め方

キャップを右方向(時計回り)に回転させキャップをしっかり閉めてください。



注意: 採取後は速やかに検査機関で検査を実施してください。