


## CMセブンー5採便管による正しい便のとり方

### 1. キャップの開け方

キャップを左方向(逆時計回り)に回転させ      キャップを開けてキャップ採便スプーンを引き抜きます。

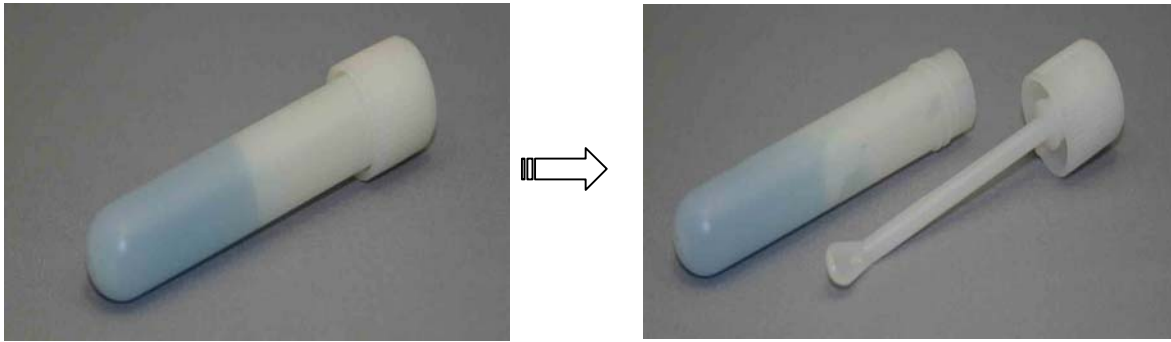

### 2. 便のとり方

キャップ採便スプーン(先端)であずき大の便を採取してください。  
(スプーン先端にのる少量の便)



注意: 直接肛門に入れての採取はできません。

### 3. キャップ本体の装着

採便管本体に、便を採取したままキャップ採便スプーンを挿入してください。



### 4. キャップの閉め方

キャップを右方向(時計回り)に回転させキャップをしっかり閉めてください。



注意: 採取後は速やかに検査機関で検査を実施してください。